

Het labelen van buisjes voor bloedafname

Hieronder vindt u instructies die u helpen bij het correct labelen van de buisjes voor bloedafname. **Correct gelabelde buisjes zorgen voor een snellere analyse**, waardoor de resultaten eerder beschikbaar zijn voor u en uw patiënt.

Wel

- Plak het label direct onder de dop
- Zorg dat het venster met bloed zichtbaar blijft
- Zorg dat het nummer boven de barcode en onder de dop staat
- Zorg dat het witte vlak zich onder de barcode bevindt



Niet

Onleesbare barcode



Label over dop



Label eromheen gevouwen



Witte vlak boven de barcode



Label scheef geplakt



Venster met bloed niet zichtbaar



Meerdere buisjes met één label

