

Medische Microbiologie

Altijd naam en geboortedatum op het afnamemateriaal vermelden!


Urine-afnameset
B Urine potje, buis geel/zwart dop

Aard materiaal	Midstream urine
Diagnostiek	Kweek
Bewaarconditie na afname	Kamertemperatuur
Verzendinstructie	Vul de buis volgens afname instructie. Lever deze bij voorkeur in binnen 24 uur (max 3 dgn) in een safetybag via onze transporteurs of bij een Unilabs afnamelocatie.



Urine-afnameset
C Urinepotje, buis wit/zwart dop

Aard materiaal	First stream urine
Diagnostiek	(SOA) PCR
Bewaarconditie na afname	Koelkast
Verzendinstructie	Vul de buis volgens afname instructie. Lever deze bij voorkeur in binnen 24 uur (max 3 dgn) in een safetybag via onze transporteurs of bij een Unilabs afnamelocatie.

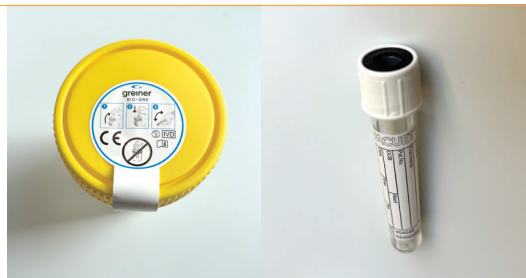


eSwab roze/blauw
G Aard materiaal
R Diagnostiek
R Bewaarconditie na afname
R Verzendinstructie

	Uitstrijk algemeen (roze); uitstrijk nasofarynx of urethra (blauw)
	Kweek en PCR
	Koelkast
	Bij voorkeur binnen 24 uur (max 3 dagen) inleveren in safetybag via onze transporteurs of bij een Unilabs afnamelocatie.


Let op!

- Swab afbreken op afbreekpunt en laat deze in de buis met vloeistof achter.
- Vermeld herkomst van het materiaal.

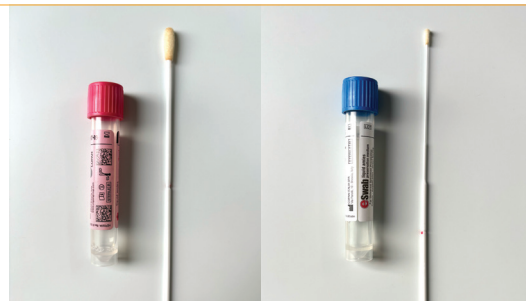

Dipslide
A Aard materiaal
A Bewaarconditie na afname
A Verzendinstructie

	Dipslide. NB: Bij verdenking urineweginfectie heeft een urinebuis met geel/zwarte dop de voorkeur.
	Kamertemperatuur
	Bij voorkeur binnen 24 uur (max 3 dagen) inleveren in safetybag via onze transporteurs of bij een Unilabs locatie.

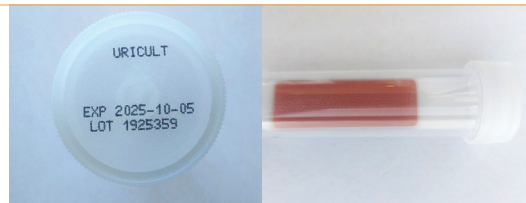

Feces container
D Aard materiaal
D Diagnostiek
D Bewaarconditie na afname
D Verzendinstructie

	Feces
	Kweek, microscopie, antigeentest, PCR en calprotectine (klinische chemie)
	Koelkast
	Bij voorkeur binnen 24 uur (max 3 dagen) inleveren in een safetybag via onze transporteurs of bij een Unilabs afnamelocatie.

Let op!

- Potje voor de helft vullen en goed dichtdraaien



Steriele container
P Aard materiaal
P Diagnostiek
P Bewaarconditie na afname
P Verzendinstructie

	Sputum, bal, pus, biopt, weefsel, wondvochten, semen, haren, nagels, huidschilfers
	Kweek, microscopie en PCR
	Koelkast
	Bij voorkeur binnen 24 uur (max 3 dagen) inleveren in een safetybag via onze transporteurs of bij een Unilabs afnamelocatie.

Let op!

- Vermeld aard en herkomst van het materiaal.



Plakbandpreparaat
F Aard materiaal
F Diagnostiek
F Bewaarconditie na afname
F Verzendinstructie

	Perianale huid
	Microscopie (<i>Enterobius vermicularis</i>)
	Kamertemperatuur
	Binnen 24 uur inleveren in een safetybag via onze transporteurs of bij een Unilabs afnamelocatie.

Let op!

- 's Morgens afnemen voor het wassen volgens de afname instructie.
- Plak het plakband vervolgens op een objectglaasje.
- NB: Doorzichtig plakband gebruiken, dus geen scotch tape.



Overige (Klinische Chemie/Pathologie)

Altijd naam en geboortedatum op het afnamemateriaal vermelden!

Urine-afnameset

Urine potje, buis geel/rode dop

Aard materiaal Urine
Diagnostiek Urinescreening (stripanalyse) en
dysmorfe erythrocyten en/of (cel) cylinders
Bewaarconditie na afname Koelkast
Verzendinstructie Na afname zo snel mogelijk inleveren in safetybag
via onze transporteurs of bij een Unilabs locatie.



iFOBT

Buis met groene dop

Diagnostiek Screeningstest om niet zichtbaar (occult) bloed in de ontlasting aan te tonen.
Bewaarconditie na afname Koelkast
Verzendinstructie Binnen 24 uur (max. 3 dagen) inleveren in safetybag via onze transporteurs
of bij een Unilabs afnamelocatie.



ThinPrep Pap TEST

Dunne laag potjes

Diagnostiek Voor het maken van cervixuitstrijken voor een medische indicatie.
Voor moeilijk af te nemen uitstrijk kunt u een speciale endocervicale
brush aanvragen. Dit materiaal is ook geschikt voor aanvullend HPV onderzoek.
Bewaarconditie na afname Kamertemperatuur
Verzendinstructie Na afname zo snel mogelijk inleveren in safetybag via onze transporteurs
of bij een Unilabs afnamelocatie.



Biopstans

3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm en biopsy blades (mesje voor shave-biopt)

Diagnostiek Voor het maken van huidbiopten voor histologisch onderzoek.



PA potje

10% formaline

Diagnostiek Voor het verzenden van materiaal van histologisch onderzoek.
Bewaarconditie na afname Kamertemperatuur
Verzendinstructie Na afname zo snel mogelijk inleveren in safetybag via onze transporteurs
of bij een Unilabs afnamelocatie.

Let op! Gebruik per biopt één potje.
Alle potjes van één patiënt in één safetybag inleveren.



Semen container steriel

Diagnostiek Fertiliteitsonderzoek
Bewaarconditie na afname Kamertemperatuur
Verzendinstructie • Voor het inleveren van dit materiaal dient een afspraak gemaakt te worden.
• Materiaal moet binnen 1 uur na afname persoonlijk worden ingeleverd op de hoofdlocatie.
• Semen bewaren op kamertemperatuur en niet blootstellen
aan hoge/lage temperaturen.



BESTELLEN MATERIALEN

(Gratis) materialen kunt u via onze website bestellen.
Ga naar www.unilabs.nl/zorgverlener/materiaal-bestellen

INTERCOLLEGIAAL OVERLEG

U kunt – 24 uur per dag – contact opnemen
met een van onze vakspecialisten

• Arts-microbioloog 030 236 11 00 – optie 1
• Klinisch chemicus 030 236 11 00 – optie 2
• Apotheker ziekenhuis 030 236 11 00 – optie 3