

Inwerklijst Praktijkmedewerker POCT/CRP**POCT.INW.CRP001 - versie 25 - Vertrouwelijk**

Datum : _____
Naam praktijk : _____
Naam medewerker : _____
Emailadres : _____
Naam opleider : _____
Type analyser ☐ QuikRead go ☐ Afinion
ID/Serienummer ID _____

Pre-analyse

- ☐ Waarvoor gebruik je deze test
- ☐ Waar plaats je de analyser (zie ook instructie analyser)
- ☐ Welke materialen heb je nodig, wat zijn de bewaarcondities, houdbaarheidsdatum
- ☐ Uitleg over kwaliteitscontrole
- ☐ Bezoek van POCT-medewerkers
- ☐ Gebruik van POC-test tijdens het afleggen van visites (indien van toepassing)

Analyse

- ☐ Invoeren gegevens gebruiker en patiënt
- ☐ Handen wassen
- ☐ Voorkomen van melken
- ☐ Gebruik juiste prikker
- ☐ Gebruik handschoenen
- ☐ Eerste bloeddruppel niet gebruiken
- ☐ Voorkomen van luchtbellens in de monsterverzamelaar
- ☐ Schoonhouden onderkant cuvet
- ☐ Wat te doen bij een storing
- ☐ Demonstratietest uitgevoerd en praktijkmedewerker zelf een test uit laten voeren
- ☐ Verzenden van uitslagen via LIS
- ☐ Correct plaatsen van cap op cuvet, gelet op het groene palletje - N.v.t. bij Afinion
- ☐ Correct vullen van monsterverzamelaar - N.v.t. bij Afinion

Post-analyse

- ☐ Onderhoud taken
- ☐ Ordermodule van POCT-connect uitleggen
- ☐ Gebruik website www.saltro.nl/poct/praktijklab voor instructies e.d.
- ☐ Bestellen via website
- ☐ Proces: het Praktijklab uitleggen
- ☐ Kwaliteitscontroles 3 maal per jaar uitvoeren

Bevoegdheidsverklaring

Opleider en medewerker zijn er van overtuigd dat de medewerker bekwaam is om zelfstandig de genoemde POC-test uit te voeren:

Onderzoek	Datum	Paraaf medewerker	Paraaf opleider

- ☐ Formulier naar Het Praktijklab sturen (email: poc.nl@unilabs.com)