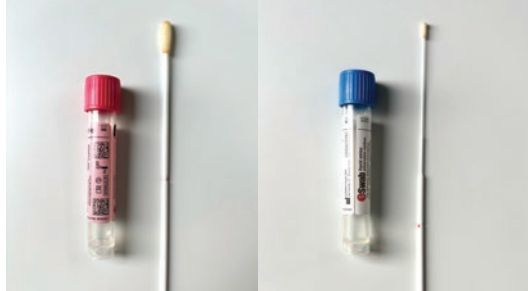


Medische Microbiologie

	Urine-afnameset		
B	Urine potje, buis geel/zwart dop		
Aard materiaal	Midstream urine		
Diagnostiek	Kweek		
Bewaarconditie na afname	Kamertemperatuur		
Verzendinstructie	Vul de buis volgens afname instructie. Lever deze bij voorkeur in binnen 24 uur (max 3 dgn) in een safetybag via onze transporteurs of bij een Unilabs afnamelocatie.		

	Urine-afnameset		
C	Urinepotje, buis wit/zwart dop		
Aard materiaal	First stream urine		
Diagnostiek	(SOA) PCR		
Bewaarconditie na afname	Koelkast		
Verzendinstructie	Vul de buis volgens afname instructie. Lever deze bij voorkeur in binnen 24 uur (max 3 dgn) in een safetybag via onze transporteurs of bij een Unilabs afnamelocatie.		

	eSwab roze/blauw		
G	Aard materiaal	Uitstrijk algemeen (roze); uitstrijk nasofarynx of urethra (blauw)	
	Diagnostiek	Kweek en PCR	
R	Bewaarconditie na afname	Koelkast	
	Verzendinstructie	Bij voorkeur binnen 24 uur (max 3 dagen) inleveren in safetybag via onze transporteurs of bij een Unilabs afnamelocatie.	
	Let op!	- Swab afbreken op afbreekpunt en laat deze in de buis met vloeistof achter. - Vermeld herkomst van het materiaal.	

	Dipslide		
A	Aard materiaal	Dipslide. NB: Bij verdenking urineweginfectie heeft een urinebuis met geel/zwarte dop de voorkeur.	
	Bewaarconditie na afname	Kamertemperatuur	
	Verzendinstructie	Bij voorkeur binnen 24 uur (max 3 dagen) inleveren in safetybag via onze transporteurs of bij een Unilabs locatie.	


	Feces container		
D	Aard materiaal	Feces	
	Diagnostiek	Kweek, microscopie, antigeentest, PCR en calprotectine (klinische chemie)	
	Bewaarconditie na afname	Koelkast	
	Verzendinstructie	Bij voorkeur binnen 24 uur (max 3 dagen) inleveren in een safetybag via onze transporteurs of bij een Unilabs afnamelocatie.	
	Let op!	Potje voor de helft vullen en goed dichtdraaien	

	Steriele container		
P	Aard materiaal	Sputum, bal, pus, biopt, weefsel, wondvochten, semen, haren, nagels, huidschilfers	
	Diagnostiek	Kweek, microscopie en PCR	
	Bewaarconditie na afname	Koelkast	
	Verzendinstructie	Bij voorkeur binnen 24 uur (max 3 dagen) inleveren in een safetybag via onze transporteurs of bij een Unilabs afnamelocatie.	
	Let op!	Vermeld aard en herkomst van het materiaal.	

	Plakbandpreparaat		
F	Aard materiaal	Perianale huid	
	Diagnostiek	Microscopie (<i>Enterobius vermicularis</i>)	
	Bewaarconditie na afname	Kamertemperatuur	
	Verzendinstructie	Binnen 24 uur inleveren in een safetybag via onze transporteurs of bij een Unilabs afnamelocatie.	
	Let op!	's Morgens afnemen voor het wassen volgens de afname instructie. - Plak het plakband vervolgens op een objectglaasje. - NB: Doorzichtig plakband gebruiken, dus geen scotch tape.	

Altijd naam en geboortedatum op het afnamemateriaal vermelden!

Overige (Klinische Chemie/Pathologie)

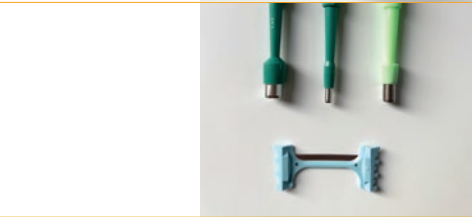Urine-afnameset Urine potje, buis geel/rode dop Aard materiaal Urine Diagnostiek Urinescreening (stripanalyse) en dysmorphe erythrocyten en/of (cel) cylinders Bewaarconditie na afname Koelkast Verzendinstructie Na afname zo snel mogelijk inleveren in safetybag via onze transporteurs of bij een Unilabs locatie.	
iFOBT Buis met groene dop Diagnostiek Screeningstest om niet zichtbaar (occult) bloed in de ontlasting aan te tonen. Bewaarconditie na afname Koelkast Verzendinstructie Binnen 24 uur (max. 3 dagen) inleveren in safetybag via onze transporteurs of bij een Unilabs afnamelocatie.	
ThinPrep Pap TEST Dunne laag potjes Diagnostiek Voor het maken van cervixuitstrijken voor een medische indicatie. Voor moeilijk af te nemen uitstrijk kunt u een speciale endocervicale brush aanvragen. Dit materiaal is ook geschikt voor aanvullend HPV onderzoek. Bewaarconditie na afname Kamertemperatuur Verzendinstructie Na afname zo snel mogelijk inleveren in safetybag via onze transporteurs of bij een Unilabs afnamelocatie.	
Biopsstans 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm en biopsy blades (mesje voor shave-biops) Diagnostiek Voor het maken van huidbiopsen voor histologisch onderzoek.	
PA potje 10% formaline Diagnostiek Voor het verzenden van materiaal van histologisch onderzoek. Bewaarconditie na afname Kamertemperatuur Verzendinstructie Na afname zo snel mogelijk inleveren in safetybag via onze transporteurs of bij een Unilabs afnamelocatie. Let op! Gebruik per biops één potje. Alle potjes van één patiënt in één safetybag inleveren.	
Semen container steriel Diagnostiek Fertiliteitsonderzoek Bewaarconditie na afname Kamertemperatuur Verzendinstructie • Voor het inleveren van dit materiaal dient een afspraak gemaakt te worden. • Materiaal moet binnen 1 uur na afname persoonlijk worden ingeleverd op de hoofdlocatie. • Semen bewaren op kamertemperatuur en niet blootstellen aan hoge/lage temperaturen.	

BESTELLEN MATERIALEN

(Gratis) materialen kunt u via onze website bestellen.
Ga naar www.unilabs.nl/zorgverlener/materiaal-bestellen

INTERCOLLEGIAAL OVERLEG

U kunt – 24 uur per dag – contact opnemen met een van onze vakspecialisten

- Arts-microbioloog 030 236 11 00 – optie 1
- Klinisch chemicus 030 236 11 00 – optie 2
- Apotheker ziekenhuis 030 236 11 00 – optie 3